


动物重症
监护仓【附注】

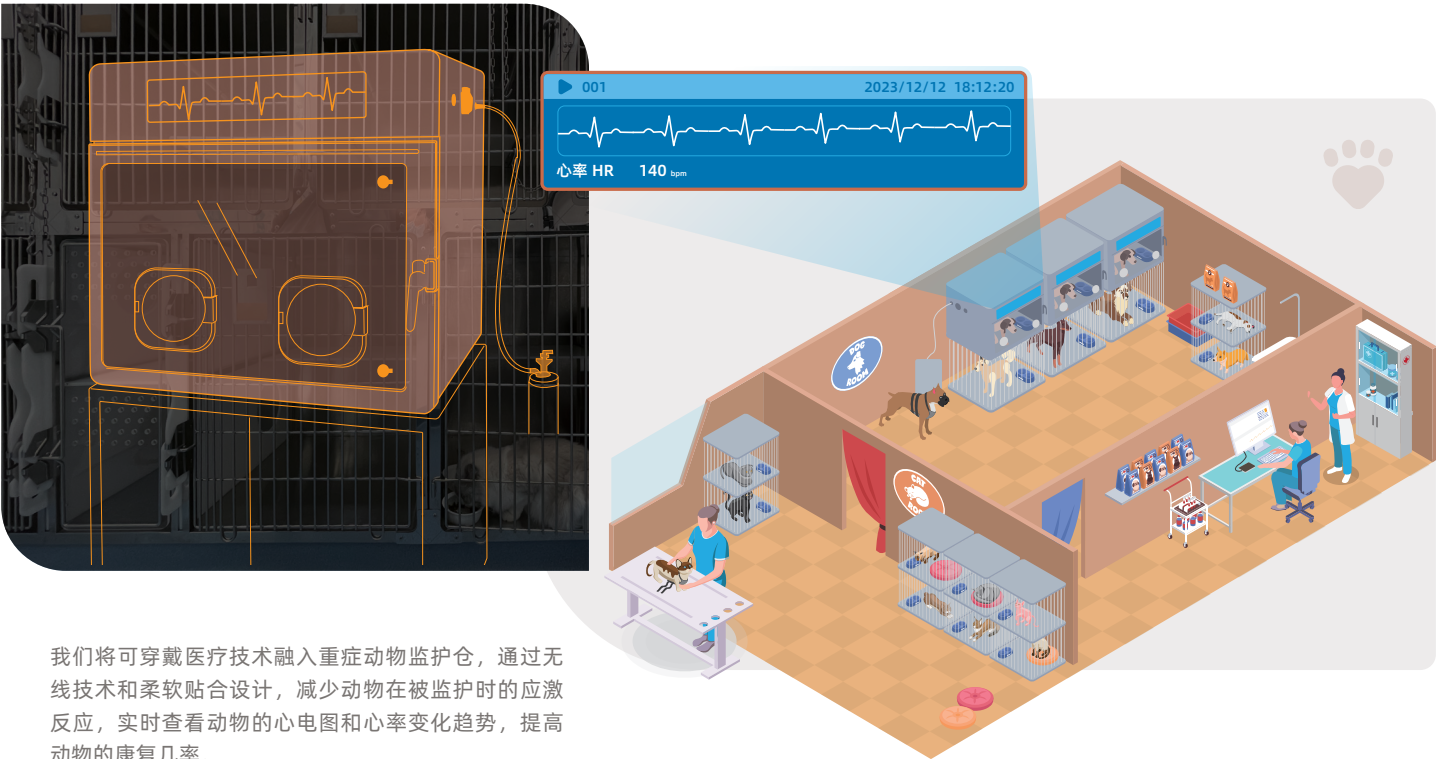

我们将可穿戴医疗技术融入重症动物监护仓，通过无线技术和柔软贴合设计，减少动物在被监护时的应激反应，实时查看动物的心电图和心率变化趋势，提高动物的康复几率。

【附注】对术后或体温异常的动物，重症监护仓通过心电图的监测以及对温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的精准控制，为动物提供最舒适的医疗护理环境，以加快动物康复。

配附件
和收纳箱



STARCARE
In care of your ST & AR

animals

星康动物医疗

非常感谢您对星康动物医疗产品的兴趣和关注！❤️

关于我们

宠物正逐渐成为人类家庭不可或缺的成员。与人类同伴相似，宠物也容易患病，包括心血管病等一系列疾病。

星康动物医疗致力于满足宠物医疗需求，从传感器、硬件、软件、算法、云技术及配附件等每一个方面认真打造专门用于动物心电检查的专业设备。

星康动物医疗精心设计的兽用心电诊断系统和生成的宠物心电图遵循与人类医疗设备和软件相同的严格质量标准。

星康动物医疗旗下的临床团队提供精准的人工动态心电图读图服务。

星康动物医疗的产品与临床服务旨在显著提升兽医临床工作的效率与成效。同时，赋能兽医专业人员和宠物主人，以便更早地诊断、治疗和预防宠物心脏健康问题，确保我们的爱宠能够享受更长久、更健康的生活。

理念

务专业专注之实，行数据护心之道。
敬畏、创新、高标准、诚信服务。

愿景

成为全球头部的宠物心电健康监测、诊断技术及宠物心电图解读服务的提供者。

您知道吗？



每 10 只猫中
就有 1.5 只患有心脏病*



每 10 只狗中
就有 1只患有心脏病*

随着年龄增长，猫和狗的心脏病风险在上升。如果猫和狗**不进行心电图等检查**，重要的心脏健康隐患可能会被**忽略**。

*<https://www.purinainstitute.com/science-of-nutrition/transforming-heart-health/cardiac-conditions>

深圳星康医疗科技有限公司

广东省深圳市高新南环路46号留学生创业大厦二期15层
0755-86689688
service@starcareanimals.com
www.starcareanimals.com

CATCHER 311V

兽用穿戴式
单导动态心电图记录仪

II 导联



产品规格	
重量:	≤30g
采样率:	500Hz
导联系统:	II 导联
传输模式:	BLE、USB
防水等级:	IP68
佩戴时间:	连续使用长达3天

- 穿戴式背心传感器
- 操作简单，可不用剃毛【附注】
- 活动状态下仍保持良好信号质量

【附注】剔除电极贴附区域的毛发可以获得更好的信号质量

单导长程动态心电图报告

用于捕捉偶发的或阵发的症状

311V动态监护仪的佩戴时间可预设为一小时至三天。311V动态心电图报告由诊断算法自动生成，并确保其准确性和可靠性，经由我们的专业团队进行严格的二级人工审核。报告内容包括：

- (1) 心搏的详细统计分析
- (2) 考虑心律和ST段变化的综合分析结论
- (3) 展示关键异常心律和ST事件的心电图图条



穿戴式
宠物心电图背心传感器

321V 和 311V



- 穿戴简单，操作便捷
- 符合猫和犬行为习惯的设计，减少应激反应
- 柔软防水面料，适合不同体型猫和犬的尺码
- 精确的心电信号采集，在宠物活动的状态下保证高质量的心电波形

CATCHER 321V

兽用穿戴式
6导二合一静息心电图机和动态心电图仪

六肢体导联




AI辅助的静息心电图报告

用于快速地发现持续存在的心脏问题

基于对10秒静息心电图细节的分析，321V的AI辅助的静息心电图报告提供：

- (1) P-QRS-T波群之间各个间期和心电图轴
- (2) 供临床人员诊断时参考的解析语句，其类别包括心电图、心律失常、传导阻滞、房室异常、ST-T改变等

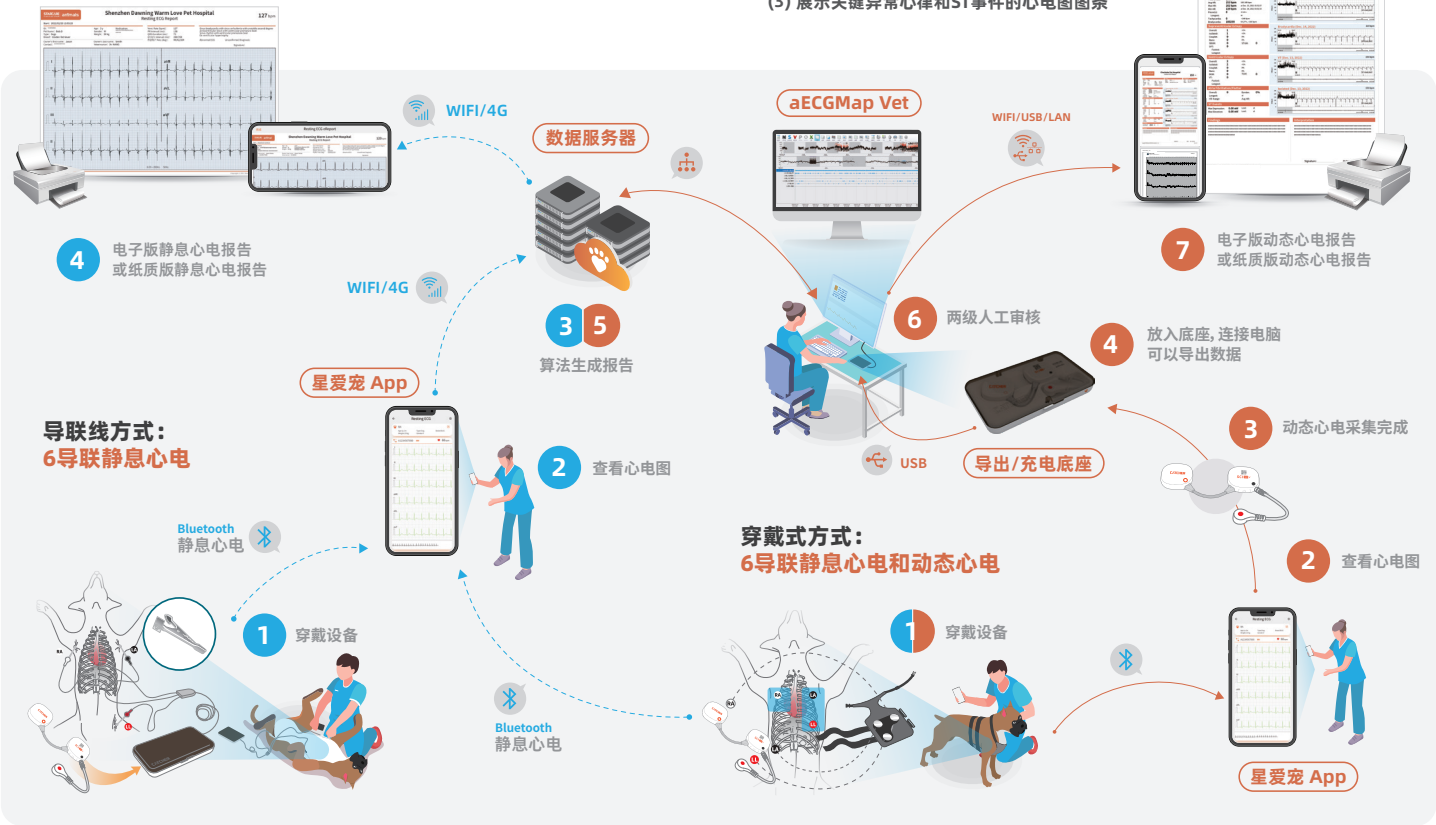

便携式带自动诊断功能的
兽用心电图机

321V

简捷、快速且经济实惠：使用导联线和电极夹连接宠物的3个肢体，30秒内完成静息心电图数据采集，并同时自动生成AI辅助诊断报告。



- 穿戴式传感器或常规导联线
- 轻便的静息心电图仪加动态心电图仪
- 自动生成AI辅助的静息心电图诊断报告

产品规格	
重量:	≤30g
采样率:	500Hz
导联系统:	I、II、III、aVR、aVL、aVF
传输模式:	BLE、USB
防水等级:	IP67
佩戴时间:	连续使用长达3天

6导长程动态心电图报告

用于捕捉偶发的或阵发的症状

321V动态监护仪的佩戴时间可预设为一小时至三天。321V动态心电图报告由诊断算法自动生成，并确保其准确性和可靠性，经由我们的专业团队进行严格的二级人工审核。报告内容包括：

- (1) 心搏的详细统计分析
- (2) 考虑心律和ST段变化的综合分析结论
- (3) 展示关键异常心律和ST事件的心电图图条

